


-  Chargencode  verwendbar bis  Medical Device  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten  bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
-  trocken aufbewahren  von Sonnenlicht fernhalten
-  enthält Naturkautschuklatex  nicht wiederverwenden

IWWIT.DE

mit
ICH WEISS
WAS ICH TU

FICKEN FICKEN FICKEN


[D] Gebrauchsanweisung
Die Kondominzäpfung (Faltenbretchen) auf der Innenseite des Kondoms wird durch einen Riss in der Folie während der Benutzung durch das Kondom mit dem Ringemagel Schmutz usw. zu vermeiden. Das Kondom (Kondompe) mit Ölcreme und Zäpfelgel zusammenrollen, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den eregierten Penis setzen, und über den gesamten Penis abdrücken. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man spürt, dass das Kondom abtrocknet oder übermäßig auf dem Penis spant. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, bevor er zu zerfallen beginnt, auf die gleiche Weise herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen. Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, der bei Latexallergikern eventuell allergische

 Deutsche Aidshilfe



mit ICH WEISS
WAS ICH TU

1 naturfarbenes Marken kondom „AMOR NATURE“ aus Naturkautschuklatex, glatt, 63 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, mit Gleitmittel, elektronisch geprüft.

 5188  ISO 4074   

1 Sacht Gleitmittel „Vibratissimo Play Gel med“, wasserbasierend, 4 ml  A261502

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

 AMOR
Gummiwaren GmbH,
August-Rost-Str. 4,
99310 Arnstadt, Germany
 2029-04

   
CE 0197

Rev. 2024-02

Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorruhen kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Keine fetthaltigen Gleitmittel wie Vaseline, Babyöl, Körperöle, Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden. Die Anwendung von Medikamenten, die in Kombination mit dem Kondom kommen können, ist in der Apotheke zu beraten. Medizinische Hilfe ist möglichst schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, oder sofort den Unverträglichkeiten aufzuteilen. Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und von Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Chargennummer hinter dem Chargencodesymbol und das Verfallsdatum hinter dem Symbol, verwendet bis auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte und dienen dazu, bei der Vermeidung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft zu wirken. Keine Art von Verhütungsmittel gegen einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen.

WAS SCHIEF GEGANGEN?
DANN MACH PEPi
SCHNELL, NE

DIE PREP



ES GIBT NOCH MEHR SAFER SEX! ◀ ▶



DEIN KONDOM

DEIN SCHUTZ VOR HIV



MEINE WAHL, DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

SCHUTZ DURCH
THERAPIE

